



# ENTRETIEN DES PINCES

**AVANT** la première utilisation : nettoyer, désinfecter et stériliser

**NETTOYAGE/DESINFECTION** après utilisation (suivre les instructions du fabricant) :

- Tous les instruments doivent être décontaminés et nettoyés immédiatement après utilisation pour enlever les résidus, le sang et ainsi éviter leur séchage sur les pinces. Exemple de désinfectant : ID 212 forte (Dürr Dental)

**ATTENTION :**

- Ne pas utiliser des solutions contenant du NaCl
- Avoir un produit désinfectant avec marquage CE
- Rincer très soigneusement l'instrument avec de l'eau distillée. Un rinçage pas ou mal réalisé immédiatement après la désinfection et le nettoyage peut provoquer la formation de points de rouille ou de tâches.
- Sécher très soigneusement les instruments, ceux-ci ne doivent pas présenter une quelconque trace d'humidité. Le séchage à l'air comprimé est recommandé. Si les étapes ne sont pas suivies correctement, les instruments peuvent être sujets à la corrosion ou à des décolorations en cours de stérilisation.

**STERILISATION :**

Stériliser toujours les instruments en position ouverte et parfaitement secs. En cas d'utilisation de sachet, assurez-vous que celui-ci ne contienne aucune trace d'humidité.

- Stérilisation autoclave : Ne pas mélanger des instruments chromés avec des pinces en acier inoxydable.
- Stérilisation à froid : Se référer aux instructions sur le nettoyage et la désinfection.

**ENTRETIEN :**

Appliquer de la paraffine médicale (ECI0150) sur les articulations et pièces mobiles.

**TACHE DE SANG/ROUILLE :**

- La rouille est contagieuse, sortez les instruments contaminés du cycle de nettoyage/désinfection et traitez-les.
- Utiliser le détergent ELMA EC60 (I 9999) en suivant les instructions.
- Par bain, utiliser des instruments de mêmes métaux (risque de corrosion si différents métaux sont nettoyés dans le même bain).

**MORS USÉS ?**

Nous aiguisons pour vous.

